

**Почему выбирают  
менструальную чашу  
Lovely Sense Cup**

- ☒ Премиальное качество
- ☒ Безопасность
- ☒ Защита до 8 часов
- ☒ 100% защищает от протекания
- ☒ Гарантия 5 лет
- ☒ Удобная анатомическая форма
- ☒ Экологически чистый состав используемых материалов
- ☒ Экономичность

Менструальная чаша Lovely Sense Cup имеет анатомическую форму. Изготовлена из медицинского силикона премиального качества, который не вызывает раздражение и не впитывает. Также он широко используется при изготовлении изделий медицинского назначения, таких как детские пустышки, катетеры и т.д.



**Менструальная чаша  
Lovely Sense Cup**

размер **S+L**

Модель: Lovely Cup Classic

Состав: 100% медицинский силикон  
Изготовитель: ООО «ЛАВЛИ ГРУП», 115035 Москва,  
Космодамианская наб., д. 4/22, корп. 5  
sales@lovelysense.ru  
Дата изготовления: 2021 год



2002606545006



**Как использовать вашу Менструальную чашу  
Lovely Sense Cup**

- \* Проклятите 5 минут при первом использовании
- \* Тщательно вымойте руки
- \* Выберите для себя наиболее удобное положение для введения чаши
- \* Введите чашу
- \* Для того, чтобы чаша раскрылась, возьмите ее за основание и проверните на один неполный круг, одновременно с этим, медленно потяните вниз, чтобы создать герметичное всасывание
- \* Аккуратно проведите пальцем по краю чаши, проверяя раскрылась ли она.

**Как извлечь вашу Менструальную чашу  
Lovely Sense Cup**

1. Тщательно вымойте руки
2. Осторожно потяните ножку чаши пока не достигнете основания
3. Сожмите чашу у основания чтобы расслабить уплотнение или для нарушения вакуума
4. Потяните вниз и удалите чашу из влагалища
5. Промойте проточной холодной водой.

Размер S: Для умеренных выделений.  
Ширина 40 мм, глубина 75 мм, вместимость 35 мл.  
Размер L: Для обильных выделений.  
Ширина 45 мм, глубина 80 мм, вместимость 40 мл.

**Важное замечание !**

Вы можете использовать менструальную чашу до 8 часов и очищать ее в зависимости от обильности выделений.

